

DETOXDINA

DECAPANTE PARA RESTAURACIÓN
DE INSTRUMENTAL Y ACERO INOXIDABLE

Versión 6.0
11/01/2024

FICHA TÉCNICA
ÁCIDOS ORGÁNICOS
CERTIFICACIÓN INVIMA 2022015876

Color: Incoloro
pH: Ácido 1.0 – 3.0
Olor: Característico
Textura: Líquido

Elimina el óxido y las manchas de instrumentos quirúrgicos de acero inoxidable. Su uso rutinario mejorará la vida útil y la eficiencia de instrumentos de acero inoxidable, lo que ayudará a aflojar las articulaciones rígidas y los bloqueos, aumentando el brillo y la estética del instrumental y las superficies a tratar. **LISTO PARA USAR.**

Como solución ácida suave, **DETOXDINA** es seguro para usar en instrumentos delicados, así como en los diversos accesorios de endoscopios y microscopios e instrumentos oftalmológicos. **NO SE RECOMIENDA SU USO EN:** Instrumentos cromados, plateados o en bronce.

DETOXDINA es una solución restauradora segura, eficiente y rápida que elimina óxido, manchas, marcas, incrustaciones de agua dura y depósitos minerales de instrumentos quirúrgicos de acero inoxidable.

Puede ser usado en bandejas, carros, mesas quirúrgicas, camillas, sillas de ruedas de acero inoxidable, seguro en todos los metales. Para lavado con máquinas ultrasónicas y termodesinfectoras. Está libre de cloro, fosfatos y ácidos abrasivos.

Perfecto para usar en quirófanos, en todas las especialidades quirúrgicas, odontología y otras unidades para mantenimiento y restauración como en unidades de procesamiento de dispositivos médicos y/o centrales de esterilización.

PRESENTACIONES

Garrafa de 1000mL y 4000mL.
Envase con válvula dispensadora de 250mL y 500 mL.

CLASIFICACIÓN INVIMA

No requiere registro sanitario.



www.holandinacolombia.com
info@holandinacolombia.com
Teléfono: (571) 6246001
Bogotá - Colombia

HOLANDINA
Pharmaceutical

VIDA ÚTIL

33 meses.

MODO DE EMPLEO

EN INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

1. Coloque completamente limpio y abierto el instrumental quirúrgico en un recipiente plástico con tapa para que el producto penetre en todas las caras.
2. Aplique **DETOXDINA** directamente sobre el instrumental quirúrgico o las manchas a tratar.
3. Deje actuar por 30 segundos a 1 minuto. Durante este tiempo realice fricción con un cepillo de cerdas suaves de bronce o una esponja.
4. Retire el instrumental de la **DETOXDINA** y enjuáguelos bien bajo agua corriendo y con un paño limpio retire el residual que **DETOXDINA** eliminó de la superficie.
5. Si desea, puede sumergir el instrumental quirúrgico tratado en detergente multienzimático para retirar completamente el producto y enjuagar con abundante agua potable.
6. Secar con una compresa seca y/o aire comprimido y su instrumental quedara como nuevo.
7. Realice el respectivo procedimiento de limpieza con detergente enzimático, de acuerdo al tipo de instrumental y realice la desinfección de alto nivel y/o esterilización del mismo.

MOBILIARIO Y BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE

1. Asperje **DETOXDINA** sobre la superficie a tratar.
2. Deje actuar **DETOXDINA** por 30 segundos a 1 minuto
3. Con guantes realice fricción con un cepillo de cerdas suaves de bronce o una esponja.
4. Retire el producto **DETOXDINA** con abundante agua, haciendo uso de una compresa o paño limpio.

PRODUCTO UNA VEZ ABIERTO

DETOXDINA después de abierto tiene una vida útil de 90 días; siempre y cuando se mantenga en su envase original, bien tapado y a una temperatura inferior a 30 °C.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un sitio fresco y seco, mantener a temperatura inferior de 30 °C.

DISPOSICIÓN FINAL

Por ser amigable con el medio ambiente este producto puede desecharse por el desagüe.

PRECAUCIONES

Utilizar elementos de protección personal (EPP). No aplicar sobre piel o membranas mucosas. No mezclar con ningún otro producto o sustancia química. No dejar al alcance de los niños.

www.holandinacolombia.com

info@holandinacolombia.com

Teléfono: (571) 6246001

Bogotá - Colombia

HOLANDINA
Pharmaceutical